



LECTURE DU RESULTAT

POSITIV, NEGATIF, UNKLARHEIT. Diagrams showing test results with lines in T and C windows.

EINSCHRÄNKUNGEN DES TESTS. Es besteht die Möglichkeit, dass der Test ein falsches positives oder falsches negatives Ergebnis anzeigt.

FRAGEN UND ANTWOORTEN. 1. Kann ich den Ovulationstest dazu verwenden, nicht schwanger zu werden? 2. Wie zuverlässig ist der Ovulationstest? 3. Wie empfindlich ist der Ovulationstest?

7. Wie lange ist die Linie zu sehen? 8. Wenn das Ergebnis positiv ist, was ist dann der beste Zeitpunkt für den Geschlechtsverkehr? 9. Ich verwende die Temperaturmethode. Kann der Ovulationstest die Temperaturmethode ersetzen?

Table with 4 columns: Symbol, Description, Symbol, Description. Includes symbols for attention, IVD, temperature, and Lot/Ref.

BIOSEX SA 22 Boulevard Sébastien Brant 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN FRANCE. IFU_855146_ML_V02201804R01 REF : 855146

Ovulationstest

Test zur selbstdiagnose. PRINZIP. Ovulation bedeutet, dass ein Eizelle im Eierstock entpopt.

VORSICHTSMASSNAHMEN. Bevor Sie den Test durchführen, lesen Sie die Informationen zur Gebrauchsanweisung bitte sorgfältig.

INHALT DER VERPACKUNG. 10 Teststäbe 1 Gebrauchsanweisung

INDIKATIONEN. Der EXACTO Ovulationstest ist für Frauen bestimmt, die nicht spontan schwanger werden, oder für Frauen, bei denen eine Ovulationsinduktion vorgenommen wird.

BEVOR SIE DEN TEST DURCHFÜHREN. Die Verpackung enthält zehn Tests, mit denen Sie die Ovulation an mehreren Tagen nacheinander feststellen können.

Table: Dauer des Zyklus (Tage) vs. Testbeginn x Menstruation. Shows days 1-31 for tests 1-31.


1) Bestimmen Sie die durchschnittliche Dauer Ihres Menstruationszyklus. 2) Markieren Sie in der oben stehenden Tabelle die Zahl, die mit der durchschnittlichen Dauer Ihres Menstruationszyklus übereinstimmt.

Kalenderbeispiel. Calendar grid showing days 1-31 with circles highlighting day 3 and 13.

Erster Tag Ihrer letzten Periode. Datum des Anfangs den Test zu führen.

BEISPIEL: Mein Zyklus dauert im Allgemeinen 28 Tage. Die letzte Periode hat am 3. begonnen. In der Tabelle steht, dass ich vom dritten Tag an elf Tage zählen muss.

GRABCHAUSAWEISUNG

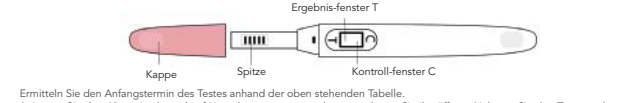

Ermitteln Sie den Anfangstermin des Testes anhand der oben stehenden Tabelle. 1. Lassen Sie den Aluminiumbeutel auf Umgebungstemperatur kommen, bevor Sie ihn öffnen.

AFLEZEN VAN HET RESU TAAT

POSITIEF, NEGATIEF, ONDUIDELIJK. Diagrams showing test results with lines in T and C windows.

BEPERKINGEN VAN DE TEST. Het is mogelijk dat de test een vals positief of vals negatief resultaat oplevert.

VRAGEN EN ANTWOOR DEN. 1. Kan ik de OVULATIE TEST EXACTO ook gebruiken om niet zwanger te worden? 2. Wat is de betrouwbaarheid van de OVULATIE TEST EXACTO? 3. Wat is de gevoeligheid van de OVULATIE TEST EXACTO?

4. Hebben alcohol of medicijnen invloed op het resultaat van de test? 5. Hoe lang blijft de lijn zichtbaar? 6. Heeft drincken invloed op het resultaat van de test? 7. Hoe lang blijft de lijn zichtbaar? 8. Als het resultaat positief is, wat is dan het beste moment om geslachtsverkeer te hebben?

9. Ik gebruik de temperatuur methode. Kan de OVULATIE TEST EXACTO de temperatuur methode vervangen? 10. Ik heb de test uitgevoerd met een positief resultaat. Ik heb in deze vruchtbare periode geslachtsverkeer gehad maar ik heb niet zwanger. Wat moet ik doen? 11. Ik heb de test uitgevoerd met een positief resultaat. Ik heb in deze vruchtbare periode geslachtsverkeer gehad maar ik heb niet zwanger. Wat moet ik doen? 12. Als ik niet ongesteld word, wil dat zeggen dat er ook geen ovulatie is?

Table with 4 columns: Symbol, Description, Symbol, Description. Includes symbols for attention, IVD, temperature, and Lot/Ref.

BIOSEX SA 22 Boulevard Sébastien Brant 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN FRANCE. IFU_855146_ML_V02201804R01 REF : 855146

