


Exacto®

Thermomètre souple & rapide

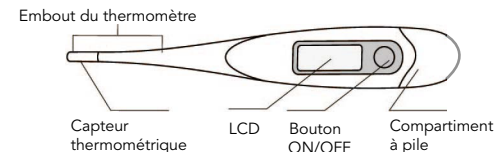

Nous vous félicitons pour l'achat de ce produit. Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser le thermomètre pour la première fois et les conserver en lieu sûr. Ce produit a été conçu pour mesurer la température du corps humain.

MODE D'EMPLOI

Avant de l'utiliser, veuillez désinfecter la sonde. Pour l'allumer, appuyez sur le bouton ON/OFF, l'appareil procède à un autocontrôle, un bip est émis lorsque le test est réalisé. Au même moment le thermomètre lance un auto contrôle en affichant tous les éléments digitaux sur l'écran. Quand les lettres «Lo» et «C» clignotent à l'écran, le thermomètre est prêt à l'emploi. Si la température ambiante est inférieure à 32 °C, alors «Lo°C» apparaît à l'écran et si la température ambiante est supérieure à 42,9 °C, alors «Hi°C» apparaît à l'écran.

Pendant la lecture, la température mesurée s'affiche et les symboles «°C» clignotent. La température précise est atteinte lorsqu'elle fige et qu'elle augmente moins de 0,1°C pendant 8 secondes. Un bip sonore est alors émis 10 fois et le symbole « °C » cesse de clignoter. La mesure la plus élevée apparaît sur l'écran. Néanmoins, veuillez noter que ce thermomètre est un thermomètre à maximum, c'est-à-dire que la température affichée peut augmenter légèrement si la prise de température se poursuit après le bip sonore. Cela s'applique en particulier à la prise de température axillaire, si une valeur de température proche de la température corporelle interne est enregistrée. Dans ce cas, veuillez voir la description du chapitre intitulé «Méthodes de prise de température». Après la prise de température, veuillez éteindre le thermomètre en appuyant sur le bouton ON/OFF. Après avoir affiché la température à l'écran, le thermomètre s'éteindra automatiquement au bout de 10 minutes.

FONCTION DE MÉMOIRE

Allumez le thermomètre. Un court bip sonore est émis. La dernière valeur de lecture en «°C» sera automatiquement affichée à l'écran pendant environ 2 secondes. La lecture sera écrasée lorsque l'écran affichera «37,0°C». Dès lors le thermomètre est prêt pour la prochaine mesure, que la mesure soit finie ou non.

MÉTHODES DE PRISE DE TEMPÉRATURE

La lecture de la température corporelle dépend de l'endroit où elle est réalisée. L'endroit de prise de température doit toujours être précisé en vue de garantir une lecture de température correcte.

Dans le rectum (rectale).

C'est la méthode la plus exacte du point de vue médical, car la température prise est plus proche de la température corporelle interne. L'embout du thermomètre est inséré soigneusement dans le rectum sur 2 cm au maximum. Le temps de prise de température habituel est d'environ 9 à 11 secondes.

Sous le bras (axillaire).

La pose du thermomètre sous le bras donne une mesure de la température en surface qui peut varier de 0,5 °C à 1,5 °C par rapport à la lecture de température rectale, chez les adultes. Le temps de prise de température habituel pour cette méthode est approximativement de 23 à 29 secondes. Il faut signaler, cependant, qu'une lecture exacte ne peut pas être obtenue si, par exemple, les aisselles ont été rafraîchies. Dans ce cas, nous recommandons d'augmenter le temps de prise de température d'environ 5 minutes pour obtenir la lecture la plus précise et la plus proche possible de la température corporelle interne.

Dans la bouche (orale).

Il existe différentes zones de chaleur dans la bouche. En règle générale, la température orale est de 0,3 °C à 0,8 °C inférieure à la température rectale. Pour garantir une prise de température aussi exacte que possible, placez l'embout du thermomètre à gauche ou à droite de la base de la langue. L'embout du thermomètre doit rester constamment en contact avec le tissu pendant la lecture et doit être placé sous la langue dans une des deux poches de chaleur situées à l'arrière, la bouche doit rester fermée pendant la prise de température et la respiration doit être régulière, par le nez. Ne mangez pas et ne buvez pas avant de prendre votre température. Le temps de prise de température habituel est d'environ 15 à 19 secondes.

Remarque: Nous vous recommandons plus particulièrement la méthode rectale, car c'est la méthode la plus précise pour identifier la température basale et vous conseillons de continuer à prendre la température 3 minutes après le bip sonore.

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION



La meilleure façon de nettoyer l'embout du thermomètre consiste à utiliser un désinfectant (par exemple de l'alcool éthylique à 70 %) à l'aide d'un chiffon humide. Le thermomètre est waterproof et peut être plongé dans un liquide ou de l'eau tiède pour un nettoyage et une désinfection en profondeur.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne mettez pas le dispositif en contact avec l'eau chaude
- N'exposez pas le thermomètre à des températures élevées ou ne le mettez pas directement au soleil.
- Ne laissez pas tomber le thermomètre. Il n'est résistant ni aux chocs, ni aux impacts.
- Ne pas modifier cet appareil sans l'autorisation du fabricant.
- Ne pliez pas ou n'ouvrez pas le dispositif (excepté le compartiment à pile)
- Ne nettoyez pas le thermomètre avec des diluants, à l'essence ou au benzène. Ne le nettoyez qu'avec de l'eau ou un désinfectant.
- Ne plongez pas les thermomètres waterproof dans plus de 15 cm d'eau, pendant plus de 30 minutes.
- Le thermomètre contient de petites pièces (piles, compartiment à pile) que les enfants peuvent avaler. Ne laissez donc pas le thermomètre dans les mains des enfants sans surveillance.
- Evitez de courber l'embout du thermomètre de plus de 45 degrés.
- Si la température ambiante est supérieure à 35 °C, trempez l'embout du thermomètre dans de l'eau froide pendant 5 à 10 secondes avant de prendre la température.

- Toute fièvre persistante, en particulier chez les enfants, doit être traitée par un médecin -veuillez contacter votre médecin traitant.
- Ne pas utiliser à proximité de champ électromagnétique fort. Gardez-le éloigné de tout système radio et de téléphones mobiles.

REPLACEMENT DE LA PILE

La pile est usée et doit être remplacée si le symbole de pile «» ou «» apparaît à droite de l'écran. Retirez le couvercle du compartiment de pile, remplacez-la par une pile du même type (de préférence sans mercure) et remettez le couvercle en place. Le signe «+» vers le haut et le signe «-» vers le bas. Nous vous conseillons de retirer les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période de temps.

OÙ JETER LE PRODUIT ?

Veuillez prendre soin de l'environnement. Les piles ne font pas partie des ordures ménagères. Veuillez les jeter à un point de collecte ou un centre de recyclage municipal comme déchet spécial. Les piles au lithium ou à combustion peuvent produire des températures excessives, s'enflammer ou exploser.






Ce symbole placé sur les produits et/ou les documents qui les accompagnent signifie que les produits électroniques consommables ne doivent pas être mélangés aux ordures ménagères conventionnelles. Veuillez transporter ces produits aux points de collecte correspondants pour qu'ils soient correctement traités et recyclés, sans frais. Pour en savoir davantage sur le point de collecte le plus proche de chez vous. Renseignez-vous auprès des administrations locales


DONNÉES TECHNIQUES

- Type: Thermomètre à maximum
- Gamme de mesures: (32,0 °C - 42,9 °C)
- Précision des mesures
 - +/- 0,1 °(35,5 °C - 42,0 °C)
 - +/- 0,2 °(32,0 °C - 35,5 °C)
- Température de stockage/transport: (-25 °C - 55 °C) , ≤ 95 % RH
- Température ambiante pendant l'utilisation: (5 °C - 35 °C) , ≤ 80 % RH
- Échelle min.: 0,1 °C
- Type de pile: Pile au manganèse alcaline, type LR41, 1,5 V
- Durée de vie minimum des piles : 100 heures en service continu ou 3 ans
- Poids: environ 13g
- Pression atmosphérique : 700 - 1060 hPa

EXPLICATION DES SYMBOLES

 ou  La pile est usée


 Consignes relatives à l'élimination des appareils électroniques

 La pile de ce produit est conforme aux exigences de la directive européenne 2006/66/CEE

Lo °C: Température inférieure à 32°C

Hi °C: Température supérieure à 42,9°C

 Appareil de type BF

 Lire attentivement la notice

IP22 Classification selon le degré de protection contre la pénétration de l'eau, tel que détaillé dans la CEI 529

 Fabricant légal et année de fabrication

EC REP Mandataire Européen

DIRECTIVES ET DISPOSITIONS LÉGALES

Ce produit est conforme à la directive européenne relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE et porte le label CE. L'appareil est également conforme aux spécifications de la norme européenne relative aux thermomètres médicaux - partie 3 : thermomètres compacts électroniques (extrapolants ou non-extrapolants) avec une fonction de mesure à maxima. Le label CE signifie qu'il s'agit d'un dispositif médical ayant une fonction de mesure, au sens stipulé par la loi sur les dispositifs médicaux et que ce produit a été soumis à une procédure de vérification de conformité. Une autorité compétente confirme que ce produit respecte toutes les réglementations légales pertinentes.

CONTRÔLE D'ÉTALONNAGE

Ce thermomètre a été initialement étalonné en usine. Si le produit est utilisé selon les opérations d'instruction, aucun étalonnage périodique sera nécessaire.

GARANTIE

Ce produit est garanti 2 ans à compter de la date d'achat. Les dommages résultant d'une utilisation incorrecte ou abusive ne sont pas couverts par cette garantie. La pile et l'emballage sont exclus de la garantie. Toute autre plainte, y compris des plaintes pour dommages, sont exclues. Si vous pensez que le fonctionnement du thermomètre est défectueux et incorrect, commencez par vérifier la pile avant de l'envoyer au service de réparation.

 **Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments Co., Ltd**
Building 2, 1# Fuzhu Nan RD,
Wuchang Town, Yuhang District,
Hangzhou, Zhejiang 310023 China

EC REP **Shanghai International Holding Corp. GmbH**
Eiffelstrasse 80, 20537
Hamburg Germany

BIO SYNEX
EASY DIAGNOSTICS FOR LIFE
 **SERVICE CONSOMMATEUR**
+33 (0) 3 69 78 85 24

Importé par **BIO SYNEX SA**
22 Boulevard Sébastien Brant
67400 Illkirch Graffenstaden
FRANCE
client@biosynex.com

REF 858928

CE 0197

IFU_858928_FR_V01201904R04

Date de dernière modification : 04/2019